

Manual do usuário Comfort Digisystem

 SecureStream
Technology

Comfort Digisystem
**Conference
Microphone
DC10**



Brasil/
Português

 **Comfort Audio**
HEAR THE FUTURE

Manual do usuário

Índice	Página
1) Introdução ao Comfort Digisystem	3
2) Informações regulamentares	3
3) Funções do Conference Microphone DC10	4
4) Funções — Carregador	4
5) Acessórios incluídos	4
6) Como começar	5
7) Modos de escuta	5
8) Menu	6
9) Mais funções	8
10) Alcance e canais do rádio	9
11) Solução de problemas	9
12) Manutenção da bateria	10
13) Dados técnicos	10
14) Serviço e garantia	10
15) Instruções de segurança importantes	11

1) Introdução ao Comfort Digisystem

Obrigado por escolher o Comfort Digisystem. Os produtos são fáceis de usar, esteja você usando um aparelho auditivo ou não.

Antes de usar o produto, leia este manual cuidadosamente.

Usando o transmissor do Conference Microphone DC10, o sinal é transferido digitalmente, resultando em um excelente som claro. Os produtos Comfort Digisystem apresentam a SecureStream Technology — uma tecnologia digital exclusiva e patenteada que permite a transferência por rádio em tempo real e livre de escutas de terceiros.

PSE (Perceptual Speech Enhancement)

O Conference Microphone DC10 é equipado com alto poder de processamento de som que é utilizado no dois modos oni (onidirecionais). O método baseia-se em enfatizar partes significativas da fala. Acesse nosso site para obter mais informações sobre como essa tecnologia funciona.

2) Informações regulamentares

Os produtos Comfort Digisystem não devem ser usados como substitutos de aparelhos auditivos e devem ser usados conforme as especificações e recomendações fornecidas por seu médico.

Recomenda-se que os clientes mantenham o controle de volume na posição mais baixa ao ligar o dispositivo. Caso contrário, o som pode causar danos à audição do indivíduo.

A Comfort Audio não se responsabiliza por danos oriundos do uso do equipamento em desconformidade com as instruções fornecidas pela Comfort Audio. A Comfort Audio não se responsabiliza por problemas de desempenho e/ou danos causados pela modificação, por parte do cliente, de qualquer peça do equipamento.

Declaração da Federal Communications Commission, Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita a duas condições:

(1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação indesejada.

ID da FCC: UOJ-DG03T

Contém ID da FCC: R47F2M03MLA

Indústria do Canadá, Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS isentos de licença da Indústria do Canadá. A operação está sujeita a duas condições:

(1) este dispositivo não pode causar interferência, e
(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

ID da IC: 6769A-DG03T

ETL

Em conformidade com o padrão UL de segurança para áudio, vídeo e aparelhos eletrônicos semelhantes — Requisitos de segurança UL 60065, Emitido em: 30/06/2003 Ed:7 Rev: 11/12/2007 Certificado para o Padrão CSA de segurança para áudio, vídeo e aparelhos eletrônicos semelhantes — Requisitos de segurança CAN/CSA-C22.2 Número 60065:03, Emitido em 01/04/2003 Ed:1 Emenda 1:2006

Número de controle ETL Intertek: 4002355

AVISO!

Mudanças ou alterações que não foram aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular o direito do usuário de operar o equipamento.

OBSERVAÇÃO:

Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, conforme a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram desenvolvidos para fornecer boa proteção contra interferências nocivas em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial à comunicação por rádio. Entretanto, não há garantia de que não haverá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção por rádio ou televisão, que pode ser detectada ligando e desligando o equipamento, o usuário será incentivado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:


- Reorientar ou mudar a antena receptora para outro local.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.




PERIGO!

NÃO USE os produtos **COMFORT DIGISYSTEM** se tiver um **MARCA-PASSO** ou outro dispositivo implantado. Os produtos Comfort Digisystem podem fazer com que o marca-passo ou outro dispositivo implantado não funcione corretamente e cause lesões graves ou até mesmo morte.

3) Funções do Conference Microphone DC10

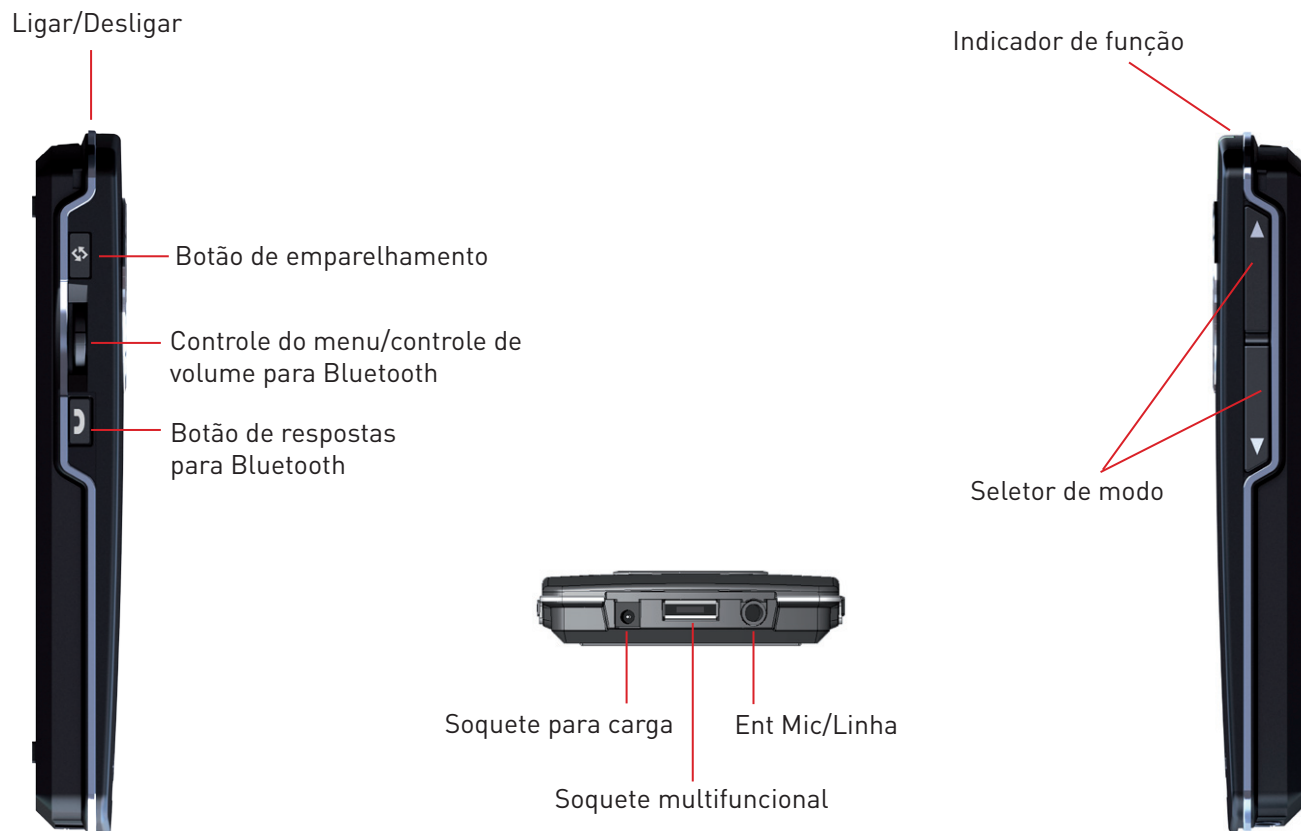

4) Funções — Carregador

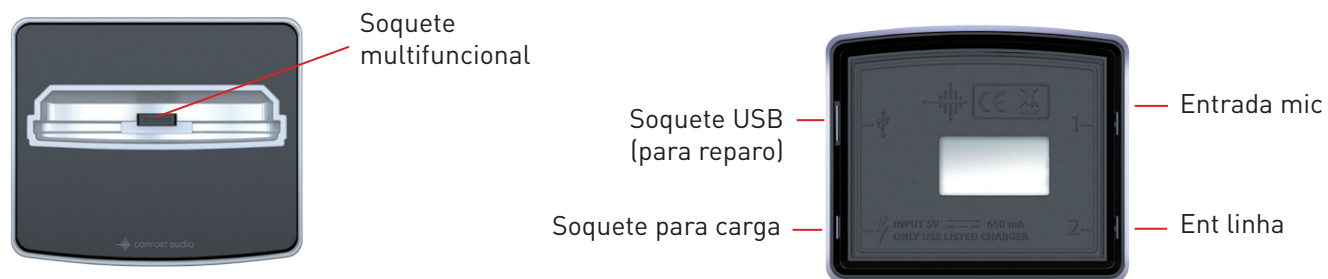

5) Acessórios incluídos


- Carregador A11
- Carregador
- Cabo
- Cabo divisor
- 2 colares
- Microfone de lapela

6) Como começar

Como carregar

O Conference Microphone DC10 é recarregável. Carregue o DC10 pelo menos cinco horas antes de usá-lo pela primeira vez. Uma bateria vazia é carregada por completo em cinco horas.

Durante o carregamento, o indicador de função aparece vermelho e é exibido um raio no símbolo da bateria na tela. Quando o símbolo da bateria for preenchido por colunas verdes, a unidade estará totalmente carregada e será alternada para o carregamento automático de manutenção.

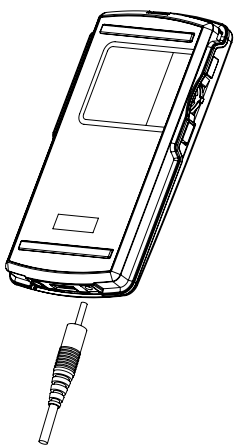

Conectando um carregador ao Conference Microphone DC10

Observe:

Use apenas o carregador fornecido pela Comfort Audio. A troca da bateria sem a assistência de um revendedor autorizado anulará a garantia limitada.

Primeira utilização

Ligue o transmissor pressionando o botão Ligar/Desligar por dois segundos aproximadamente.

Outras funções serão explicadas mais adiante neste manual.

7) Modos de escuta

O Conference Microphone DC10 sempre inicia no modo Oni amplo, por padrão.

A posição é facilmente alterada usando o seletor de modo na lateral do aparelho.

As diversas posições do microfone estão localizadas na seguinte ordem:




- Zoom



- Oni — estreito



- Oni — amplo
(posição padrão)

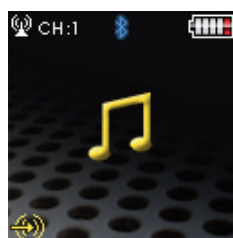

- Música

8) Menu

Controle do menu

Podem ser feitas três seleções diferentes:



Para acessar o menu, pressione o controle do menu:

Voltar

Comunicação

- ↳ Canal
- ↳ Emparelhar
- ↳ Bluetooth

Som

- ↳ Agudos e graves
- ↳ Equalizador
- ↳ Conf avançadas

Entradas

- ↳ Ent Mic/Linha
- ↳ Carregador

Configurações

- ↳ Carregar
- ↳ Idioma
- ↳ Bloquear teclas
- ↳ Nome
- ↳ Rest conf fáb

Ativar bloq teclas

Sobre

Voltar (relacionado tanto ao menu principal quanto aos submenus)

Aqui é possível escolher voltar para o menu e para a tela principal.

Comunicação

Canal

Para usar o receptor e o transmissor juntos, eles devem ser ajustados para o mesmo canal. O transmissor e o receptor são ajustados de fábrica para o canal padrão.

Para alterar o canal:

1. Selecione **Canal** no menu.
2. Selecione um novo canal usando o controle do menu.

As informações do canal também são exibidas quando as unidades estão emparelhadas.

A FFC (Free Frequency Check, Verificação de Frequência Livre) indica em verde as frequências adequadas ao ambiente específico.

Observe! Desligue qualquer outro transmissor Digisystem em seu ambiente para obter o resultado correto.

FFC dB indica o nível de ruído em dB de cada canal. Quanto maior o valor (-), menor o risco de interferência.

Emparelhar

Para usar um receptor e um transmissor juntos, eles devem estar emparelhados. Todos os transmissores e receptores estão emparelhados por padrão, de fábrica, e funcionam juntos.

Observe bem! Para impedir a escuta de terceiros, deve ser gerado e transmitido um novo código-chave entre as unidades através do emparelhamento.

A transmissão/recepção de informações de emparelhamento, juntamente com um novo código, pode ser realizada a partir de qualquer unidade Comfort Digisystem com uma tela.

Para emparelhar as unidades sem tela, consulte a seção *Emparelhamento (via botão de emparelhamento)* para obter mais informações. As informações de emparelhamento ou um novo código-chave podem ser recebidos por diversas unidades ativadas.

Emparelhamento (via menu)

1. Selecione **Comunicação — Emparelhar**
2. Selecione **Receber inf** em uma unidade. **Pronto para receber inf de empar** é exibido na tela.
3. Selecione **Novo código** na outra unidade; selecione **Sim**.
4. **Gerar novo cód e enviar inf?** é exibido na tela. Selecione **Sim** (agora, as informações de canal e codificação foram enviadas e a transferência de som está livre de escutas de terceiros).
5. Para emparelhar outra unidade em seu sistema codificado, selecione **Enviar inf** em uma de suas

unidades emparelhadas.

Emparelhamento (via botão de emparelhamento)



(A única maneira de emparelhar unidades sem uma tela, com o botão de emparelhamento)

É possível ativar a função Emparelhamento através do botão de emparelhamento.

1. Basta uma leve pressão no botão e o menu *Emparelhamento* é exibido.
2. Duas pressões leves ativam a função **Enviar inf.**
3. Uma pressão demorada ativa a função **Receber inf.**

Bluetooth™

Aqui é possível ativar o Bluetooth para poder emparelhar o Conference Microphone DC10 com um telefone ou celular. Para obter informações detalhadas para o usuário, consulte o capítulo *Mais funções — Bluetooth*.

Som

Agudos e graves

Controle de agudos e graves que permite o simples ajuste do equalizador da unidade. Pressione o botão de resposta para voltar para o menu.

Equalizador

Você pode obter um ajuste fino das características do som alterando o nível em várias frequências, de baixas a altas. O nível pode ser aumentado ou reduzido nas frequências médias 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz e 8 kHz. Pressione o botão de resposta para voltar para o menu.

Conf avançadas

Aqui é possível ajustar a compensação PSE nos modos Oni — amplo e Oni — estreito. As configurações são salvas separadamente para cada modo.

O efeito de aumentar esse valor é que o volume aumentará quando o nível de som geral do ambiente subir. Se o som ambiente for muito alto, será possível aumentar a compensação PSE, e o nível de som geral será aumentado.

Para alguém que sente que o volume sobe demais em ambientes barulhentos, a compensação PSE pode ser reduzida.

De fábrica, o modo Oni — amplo é definido como +2 e Oni — estreito como +6.

Entradas

Ent Mic/Linha

É onde é selecionada a função do microfone/linha no soquete:

- Entrada linha (para TV ou computador etc.)
- Entrada microfone (para um microfone externo, por exemplo, um microfone de lapela)
- Saída fones (para testar a unidade com fones de ouvido)

Aqui também é possível ajustar o nível da Entrada linha, Entrada microfone e fones de ouvido:

- Ganho da linha
- Ganho do microfone
- Fones de ouvido

Ao conectar uma fonte de sinal à Entrada de linha (por exemplo, uma TV), a Ent linha mista é selecionada para receber também o som ambiente pelo Conference Microphone DC10.

Carregador

Aqui é possível ajustar o nível da Entrada linha e da Entrada microfone. A Ent linha mista também pode ser selecionada para o uso com o carregador.

Não é possível usar os dois soquetes ao mesmo tempo. Nesse caso, uma mensagem de erro é exibida: **Desconectar do Mic/Linha**.

Configurações

Carregar

Aqui é possível ativar a função **Desligar auto** para desligar a unidade automaticamente durante o carregamento. Se **Reiniciar auto** estiver ativado, a unidade iniciará automaticamente quando o carregador for desconectado ou perder energia.

Idioma

Para seleção do idioma do menu.

Bloquear teclas

Quando esta função é ativada, todos os botões são bloqueados automaticamente assim que a tela apaga. Ela pode ser ativada rapidamente; consulte a seção *Ativar bloq teclas*.

Nome

Aqui é selecionado o texto a ser exibido. Escolha os símbolos com o controle do menu. Selecione ✓ para salvar e ✕ para fechar sem salvar. Para mover o cursor durante a edição, use os símbolos > e <.

Rest conf fáb

Restaura a unidade para as configurações de fábrica. Também exclui todas as informações de emparelhamento (SST e Bluetooth). Para impedir a escuta de terceiros, deve ser gerado um novo código-chave.

Ativar bloq teclas

Aqui é possível ativar o bloqueio de teclas diretamente quando o controle do menu é pressionado. Ou, então, é possível pressionar o controle do menu, e, em seguida, a seta para cima (seletor de modo) na lateral do aparelho.

Sobre

Informações do software.

9) Mais funções

Indicador de função (LED)

O indicador de função exibe as configurações de modo da unidade.

Posição Música

Pisca em verde a cada três segundos.

Posição Oni — amplo

Pisca em verde duas vezes a cada três segundos.

Posição Oni — estreito

Pisca em verde três vezes a cada três segundos.

Posição Zoom

Pisca em verde quatro vezes a cada três segundos.

Durante o carregamento, o indicador aparece em vermelho. Quando a carga foi concluída, o indicador aparece em verde. O indicador permanece vermelho quando a bateria está totalmente carregada, se a unidade estiver ligada durante a carga.

Quando a bateria fica fraca, o indicador pisca em vermelho. (Verifique o status da bateria na tela)

Assim que a unidade tiver sido ajustada para receber informações de emparelhamento, o indicador piscará em verde rapidamente.

Quando está recebendo informações de emparelhamento, o indicador fica verde por três segundos.

Quando está enviando informações de emparelhamento, o indicador pisca em vermelho cinco vezes.

Quando o modo de emparelhamento para Bluetooth é ativado, o indicador fica azul.


Quando um telefone Bluetooth é conectado com sucesso, o indicador pisca em azul cinco vezes.

Durante uma chamada telefônica, o indicador pisca em azul a cada dois segundos.

Quando **Apagar config** está selecionado, o indicador pisca em azul dez vezes.

Bluetooth

O Conference Microphone DC10 pode ser conectado a dois telefones Bluetooth ao mesmo tempo. A pessoa com quem você está falando pode escutá-lo com os microfones do DC10. Sua voz é enviada para um receptor Digisystem emparelhado.

Quando Bluetooth é ativado no menu, o símbolo de Bluetooth é exibido na tela . Se somente um telefone foi emparelhado (e conectado)

com a unidade, a figura 1 aparece no símbolo de Bluetooth da tela. Se dois telefones foram emparelhados (e conectados), a figura 2 é exibida.

Alguns telefones DECT são conectados somente durante chamadas realizadas ou recebidas. Nesses casos, a unidade também pode exibir um 1, mesmo se um celular e um telefone DECT tiverem sido emparelhados com a unidade.

O DC10 aceita perfis de fone e mãos livres para Bluetooth. O perfil é escolhido automaticamente durante o emparelhamento.

Aplicação

Emparelhamento com telefones:

Para emparelhar a unidade com telefones, consulte a seção *Comunicação*.

Para ativar Bluetooth:

Entre no menu **Comunicação — Bluetooth — Ativar**

Menu Bluetooth:

Quando **Somente BT** estiver selecionado, o transmissor será ativado somente quando a chamada de telefone estiver conectada via Bluetooth ou um cabo de fone estiver conectado e ativado."

Emparelhar celular (**Comunicação — Bluetooth — Emparelhar BT — Emparelhar celular**) (código 1234) é usado para emparelhar um celular com o DC10.

Emparelhar telefone (**Comunicação — Bluetooth — Emparelhar BT — Emparelhar telefone**) (código 0000) é usado para emparelhar um telefone fixo, sem fio (DECT) ou celular com o DC10.

Selecione **Apagar config** (**Comunicação — Bluetooth — Emparelhar BT — Apagar config**) para apagar todas as informações sobre unidades emparelhadas.

Observe: Depois disso, as unidades Bluetooth precisam ser emparelhadas novamente (para que o Bluetooth possa funcionar).

Você pode usar **Nível mescla** para selecionar o volume de sua própria voz durante uma chamada telefônica.

Para responder uma chamada entrante:

Pressione rapidamente o botão de resposta (cerca de 0,5 segundo) ou responda com o telefone.

Para encerrar uma chamada:

Pressione rapidamente o botão de resposta (cerca de 0,5 segundo) ou encerre a chamada com o telefone.

Para fazer uma chamada:

Ao fazer uma chamada, o som é automaticamente transferido através da conexão Bluetooth relevante (dependendo das configurações do telefone) para o DC10.

Uma das conexões Bluetooth (telefone, código 0000) tem prioridade. Isso significa que as funções de discagem por voz e rediscagem somente funcionam nesse telefone se dois telefones estiverem conectados.

- A discagem por voz é ativada pressionando rapidamente (aprox. 0,5 segundo) o botão de resposta.
- A rediscagem é ativada pressionando o botão de resposta por aproximadamente 2 segundos.

Posição Microfone:

Durante uma chamada telefônica, é possível selecionar entre os modos Oni — amplo, Oni — estreito e Zoom, usando os seletores de modo na lateral do aparelho.

Controle de volume:

Durante uma chamada telefônica, o volume pode ser ajustado usando o controle do menu na lateral do aparelho (isso ajusta o controle de volume do telefone). A tela exibe o volume atual.

Quando usar telefones fixos/sem fio e celulares ao mesmo tempo

Em alguns telefones fixos/sem fio, a conexão Bluetooth não está ativa quando não está sendo realizada nenhuma chamada. Isso pode provocar um atraso até que o Bluetooth seja conectado para uma chamada entrante. Em certos casos, o atraso pode ser evitado emparelhando o telefone sem fio no perfil "Emparelhar celular", mas isso pode causar problemas para iniciar chamadas de saída do telefone fixo/sem fio. Para obter mais informações, consulte "Mais funções".

Alguns celulares requerem mais ajustes para obter som suficientemente alto. Por exemplo, aumente o nível manualmente no equalizador do media player (Sony-Ericsson).

Carregador

O Conference Microphone DC10 é fornecido com um carregador. Além de carregar o microfone, o carregador também pode ser conectado a fontes sonoras externas. Existem dois soquetes no lado direito do carregador, marcados com 1 e 2 (veja abaixo).

No soquete 1, pode ser conectado um microfone externo. No soquete 2, pode ser conectado um sinal mais forte como TV, MP3, rádio etc. Não é possível usar os dois soquetes ao mesmo tempo. Nesse caso, uma mensagem de erro é exibida: **Desconectar do Mic/Linha**. O nível dessas três fontes de sinal podem então ser ajustados em **Entradas — Carregador**.

10) Alcance e canais do rádio

O transmissor e o receptor têm antenas embutidas. O alcance do rádio entre as unidades é de aproximadamente 30 metros. Entretanto, isso pode variar conforme o ambiente específico em que você estiver.

Como todos os sistemas por rádio, o Comfort Digisystem se comunica em canais específicos. Se você usar dois transmissores no mesmo canal ou em um canal vizinho, pode haver interferência. Outros equipamentos eletrônicos também podem interferir em radiotransmissões.

O canal usado em seu país talvez não seja permitido no exterior. Sempre entre em contato com o fornecedor do aparelho auditivo de seu país para saber como encontrar os canais permitidos em diferentes países.

A Comfort Audio não se responsabiliza pelo uso não autorizado de ondas de rádio, tais como, porém não limitado a: interferências na comunicação policial, comunicação estratégica, instalações militares etc.

11) Solução de problemas

O transmissor e o receptor não ligam

Carregue o transmissor e o receptor. Lembre-se de pressionar o botão Ligar/Desligar por dois segundos para ligar a unidade. Verifique se o carregador está conectado ao soquete do plugue.

Baixo nível de compreensão da fala

A distância entre o transmissor e o receptor pode ser muito grande. O alcance é de aproximadamente 30 metros. A distância entre o microfone e a pessoa que está falando também pode ser muito grande; aproxime o microfone da pessoa que está falando. Tente mudar o canal/ambiente.

Baixo alcance e interferência

Em alguns ambientes que contenham, por exemplo, estruturas de concreto, ferro ou chapas metálicas, o alcance pode ser reduzido. Também pode haver interferência causada por equipamentos próximos. Troque o canal.

Sem som

Verifique se o transmissor e o receptor estão ajustados para o mesmo canal.

Som de chiado alto (sem transferência de som)

Verifique se as unidades estão emparelhadas.

A unidade não será iniciada durante o carregamento

Desconecte o carregador. Marque a seleção **Desligar auto** em **Configurações** no menu.

12) Manutenção da bateria

Os produtos recarregáveis da série Digisystem são equipados com baterias Li-Po, o mesmo tipo de bateria usado na maioria dos telefones celulares e laptops disponíveis no mercado hoje em dia. Estes tipos de bateria podem armazenar grande quantidade de energia em relação a seu peso e volume.

A capacidade das baterias Li-Po diminui durante seu ciclo de vida. Esse tipo de bateria “vicia”, o que significa que você precisa descarregá-la completamente antes de carregar para reduzir a perda de capacidade. Isso significa que você pode carregar a bateria com frequência e pouco, ao invés de raramente e muito. Os circuitos especiais de carga dos produtos Digisystem protegem as baterias contra sobrecarga.

A capacidade das baterias Li-Po se deteriora mais rapidamente quando sujeita a uma descarga completa. Sendo assim, todos os produtos Digisystem apresentam uma função que desliga o produto automaticamente bem antes de ocorrer a descarga completa. A descarga completa ainda pode ocorrer, pois a bateria tem uma autodescarga determinada. Um produto carregado total ou parcialmente atingirá, com o tempo suficiente, um estado em que a bateria será totalmente descarregada, a menos que seja conectado a um carregador. Para evitar isso, recomendamos que a bateria seja carregada pelo menos a cada seis meses.

13) Dados técnicos

Tipo de transmissor:	SST — SecureStream Technology
Alcance:	Aprox. 30 m
Dimensões:	115 x 62 x 14 mm (4,53 x 2,44 x 0,55 in)
Peso:	90 g (3,17 oz)
Faixa de frequência:	904 - 907,5 MHz 915 - 926 MHz
Antena:	Embutida
Tempo de operação:	Até dez horas
Bateria:	Li-Po (polímero de lítio) recarregável
Tempo de carga:	Aprox. cinco horas
Microfones:	Combinação de quatro microfones embutidos, direcionais e onidirecionais
Conexões:	Ent Mic/Linha, soquete para testar com fones



Em conformidade com ANSI/UL Pad.60065

Certificado para CAN/CSA Pad. C22.2
Número 60065:03

4002355

Os pesos, dimensões, capacidades, classificações de desempenho e outros dados presentes em folhetos, prospectos, circulares, propagandas, listas de preço e instruções da Comfort Audio são mencionados apenas como informações gerais. São apenas aproximados e não obrigatórios à Comfort Audio.

14) Serviço e garantia

Extensão da garantia

A Comfort Audio Inc. fornece garantia para este produto, vendido ao primeiro usuário final (comprador), contra defeitos em materiais ou mão de obra pelo primeiro período conforme estabelecido a seguir. Conforme esta garantia limitada, a Comfort Audio, por própria opção, (a) consertará o produto ou as peças detectadas com defeito, usando peças novas ou reparadas, ou (b) fornecerá uma unidade nova, ou, por opção, uma unidade consertada. A unidade consertada ou trocada está sob garantia pelo restante do período de garantia do produto original. A garantia não inclui qualquer outro dano ou perda direta, indireta ou consequente, nem danos ou perdas de terceiros.

Esta garantia limitada é por um período de dois anos a partir da data de compra, conforme indicado por recibo original de um revendedor, loja, distribuidor ou instalação médica autorizada pela Comfort Audio. Para acessórios o período de garantia é de 90 dias a partir da data de entrega.

Como fazer uma solicitação de garantia

Para contratar o serviço de garantia, é preciso entrar em contato com o Serviço de atendimento ao cliente da Comfort Audio para obter um número de RMA (Return Merchandise Authorization, Autorização de Devolução de Mercadoria).

É necessário fornecer uma descrição do defeito, seu nome e número de telefone.

Envie o produto com frete pré-pago via UPS ou equivalente, juntamente com uma cópia do recibo original de compra, cabos, fones de ouvido e base/carregador em sua embalagem original ou em outra que ofereça a mesma proteção. Faça um seguro de seu envio contra perda ou danos. A Comfort Audio não se responsabiliza por danos ou perdas a caminho de seus escritórios.

Esta garantia limitada não cobre

Danos por uso incorreto, negligência ou desgaste natural. Produtos que tenham sido modificados. Produtos adquiridos ou reparados fora do território. Se você adquiriu seu produto fora do território, consulte o lojista para obter informações sobre a garantia.

Registro do produto

Preencha, assine e envie o Cartão de registro do produto entregue com sua unidade. Com ele, será mais fácil entrar em contato com você caso seja necessário.

Comfort Audio Inc.
350 South Northwest Hwy, Ste 300
Park Ridge, IL 60068 EUA

Para entrar em contato com o Serviço de atendimento ao cliente da Comfort Audio, ligue para (847) 656 5450 ou envie um e-mail para usa@comfortaudio.com

15) Instruções de segurança importantes — Leia isso antes de usar o produto

- 1) Leia estas instruções.
- 2) Guarde estas instruções.
- 3) Preste atenção em todos os avisos.
- 4) Siga todas as instruções.
- 5) Não use este aparelho próximo à água.
- 6) Limpe somente com um pano seco.
- 7) Não utilize próximo a fontes de calor, como radiadores, fornos, registros de calor ou outro aparelho (inclusive amplificadores) que produza calor.
- 8) Não ignore a finalidade de segurança do plugue polarizado ou de aterramento. Um plugue polarizado tem duas lâminas, uma mais larga do que a outra. O plugue com aterramento tem duas lâminas e um terceiro pino de aterramento. A lâmina larga e o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Se o plugue fornecido não encaixar em sua tomada, consulte um electricista para substituir a tomada antiga. (Somente ao usar plugues polarizados)
- 9) Proteja o cabo de alimentação para que não seja comprimido ou pisado, principalmente nos plugues de réguas de tomadas e no lugar de onde saem do aparelho.
- 10) Use apenas conexões/acessórios especificados pela Comfort Audio AB.
- 11) Desconecte este aparelho durante tempestades com raios ou se não for usado por um longo período.
- 12) Delegue todo serviço técnico a técnicos qualificados. A manutenção é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma, como um cabo ou plugue danificado da fonte de alimentação, líquido derramado ou objetos caídos sobre o aparelho, aparelho exposto à chuva ou umidade, que não funcione normalmente ou que tenha caído.
- 13) Comece escutando em um volume baixo.
- 14) Um volume muito alto pode causar danos graves à audição.
- 15) Não desmonte o produto.
- 16) Se o produto se abrir devido a danos, o reparo somente deve ser feito por técnicos qualificados.
- 17) Nunca use um transmissor ou receptor em uma frequência não permitida. Verifique com a autoridade de frequência do país onde o equipamento deve ser usado.
- 18) O produto contém equipamento eletrônico sensível e deve ser manuseado com cuidado.
- 19) Nunca carregue o produto em espaços fechados e sem ventilação, como bolsas, estojos ou outras sacolas fechadas.
- 20) Use apenas baterias e fonte de alimentação especificadas pela Comfort Audio AB.
- 21) Você não deve trocar a bateria sozinho, entre em contato com o local de compra.
- 22) CUIDADO! Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente.
- 23) O produto não deve ser exposto ao calor excessivo, como luz solar, fogo ou similares.
- 24) Os produtos incluem radiotransmissores. Não use o produto onde não seja permitido usar equipamentos eletrônicos, como, por exemplo, em aviões.
- 25) O colar não deve ser usado se houver risco de ficar preso, por exemplo, em uma máquina ou em outros objetos.
- 26) Mantenha peças pequenas longe do alcance de crianças e animais. Risco de asfixia se engolidas.
- 27) Não deixe o produto descarregado por muito tempo, a bateria pode ser danificada.
- 28) Não deixe o produto conectado ao carregador se não for usado por um longo período.

Sujeito a alterações



Fabricado por:

Comfort Audio AB

Comfort Audio AB, Box154, SE-301 05 Halmstad, Suécia
Tel. +46 35 260 16 00 Fax +46 35 260 16 50
info@comfortaudio.com www.comfortaudio.com