

Comfort Digisystem Gebrauchsanweisung

 SecureStream
Technology

Microphone DM80



Deutsch

 **Comfort Audio**
HEAR THE FUTURE

Gebrauchsanweisung

Inhaltsverzeichnis	Seite
Einleitung	3
Vorstellung Microphone DM80	3
Funktionen - Microphone DM80	4
Erste Schritte	5
Inbetriebnahme	6
Menü	7
Mehr Funktionen	13
Reichweite und Kanäle	16
Mitgeliefertes Zubehör	17
Weiteres Originalzubehör	17
Fehlersuche	18
Service und Garantie	19
Technische Merkmale	19
Wichtige Sicherheitshinweise	20

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie das Comfort Digisystem gewählt haben. Die Produkte sind einfach anzuwenden, mit oder ohne Hörgerät.

Vor Anwendung lesen Sie bitte sorgfältig diese Gebrauchsanweisung.

Das Comfort Digisystem ist mit SST Secure Stream Technology ausgerüstet, einer digitalen Technik, die abhörsichere Signalübertragung in Echtzeit ermöglicht. Der Klang ist kristallklar.

Vorstellung Microphone DM80


Das DM80 ist ein Mikrofon, das mit Bluetooth ausgestattet ist; es kann mit Mobil- und schnurlosen Telefonen verbunden werden. Außerdem kann man es auch über ein Kabel mit schnurlosen Telefonen verbinden.

Mit Hilfe des Antwortknopfes nimmt man Anrufe entgegen. Das Mikrofon sendet Ihre Stimme weiter zum Telefon.

Die Anruferstimme wird vom Telefon drahtlos und abhörsicher an jeden beliebigen Digisystem-Empfänger weitergeleitet.

Das DM80 hat ein Rundum-Mikrofon für weitere Entfernungen und ein Richtmikrofon, das vor allem in lauterer Umgebungen angewendet wird.

Funktionen - Microphone DM80

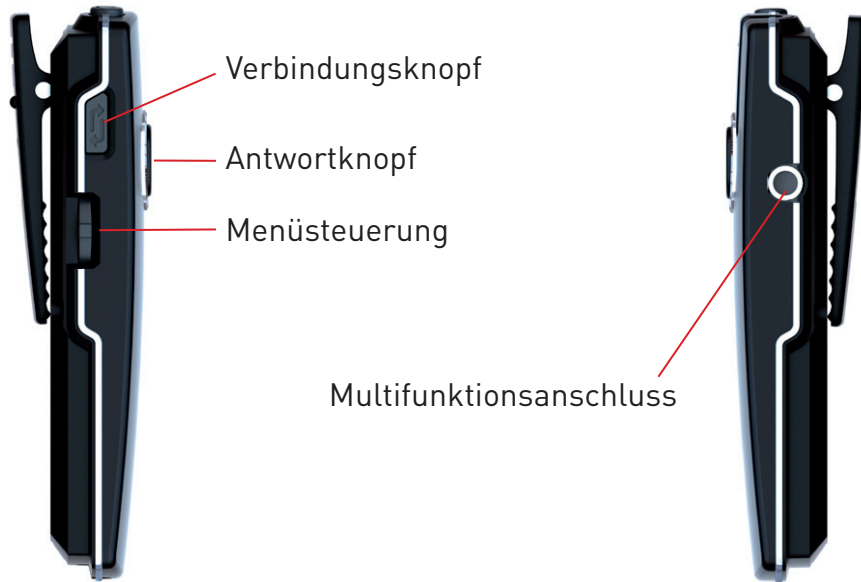


Erste Schritte

Laden

Das Microphone DM80 ist aufladbar. Laden Sie das DM80 mindestens 2 Stunden vor der ersten Anwendung. Eine leere Batterie ist in 2 Stunden voll geladen.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Funktionsanzeige rot und ein Blitz erscheint im Batteriesymbol im Display. Sobald das ganze Batteriesymbol grün gefüllt ist und die Funktionsanzeige grün leuchtet, ist das Gerät voll geladen.

Wechseln Sie die Batterie nicht selbst; bitte kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

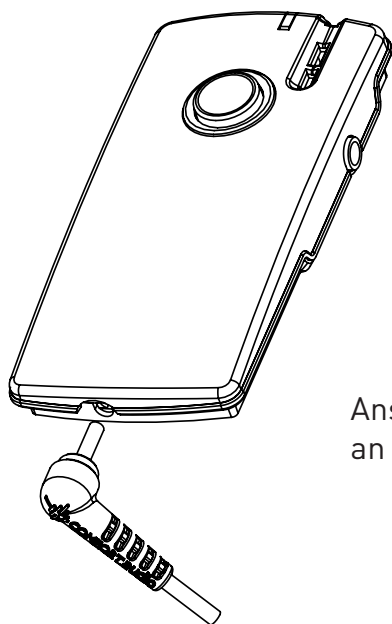

Anschließen des Ladegeräts
an das DM80

Achtung!
Verwenden Sie ausschließlich
original Comfort Audio Ladegeräte.

Inbetriebnahme

Das Mikrofon DM10 ist ein Mikrofon für nähere Reichweiten. Es arbeitet am besten innerhalb von ca. 30 cm.

Starten: Drücken Sie den Ein/Aus-Knopf ca. 2 Sekunden

Schließen Sie das mitgelieferte Ansteckmikrofon oder ein anderes Mikrofon an (falls gewünscht). Das Ansteckmikrofon kann mit Hilfe des Klipses an der Kleidung befestigt werden.

Andernfalls können Sie auch das DM80 mit Hilfe seines Klipses direkt an der Kleidung befestigen oder es an dem mitgelieferten Halsband um den Hals tragen.

Mikrofoneinstellungen

2 Einstellungen sind möglich:

- *Zoom*



- *Omni-direktional*



Einstellungen verändern:

Mikrofon im Zoom-Modus:

1. Drücken Sie die Menükontrolle **nach unten**
2. *Mikro Modus ändern?* erscheint im Display
3. Wählen Sie **Ja** (Menükontrolle eindrücken)

Mikrofon im Omni-direktional-Modus:

4. Drücken Sie die Menükontrolle **nach oben**
5. *Mikro Modus ändern?* erscheint im Display
6. Wählen Sie **Ja** (Menükontrolle eindrücken)

Achtung: Während des Ladevorgangs wird automatisch der omni-direktionale Modus aktiviert.

Weitere Funktionen werden später erläutert.


WARNUNG!

Das Halsband sollte nicht angewendet werden, wenn die Gefahr besteht, an einem Gegenstand oder einer Maschine hängenzubleiben.

Menü

Menüsteuerung

3 Möglichkeiten:

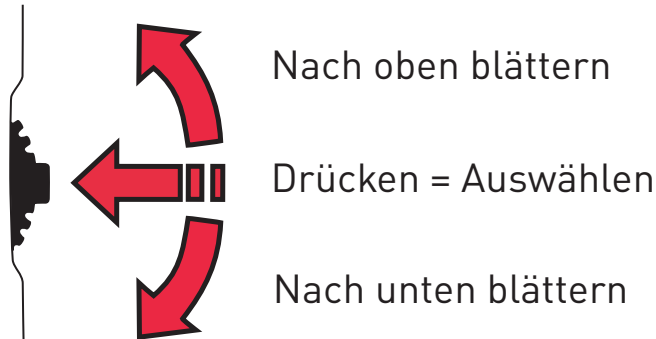

Um in das Menü zu gelangen, drücken Sie die Menüsteuerung:

Zurück

Kommunikation

- ↳ *Kanal*
- ↳ *Verb. einrichten* (Verbindung einrichten)
- ↳ *Bluetooth*
- ↳ *Telefon*

Anschlüsse

- ↳ *Ext. Mikro* (Externes Mikrofon)
- ↳ *Line in*
- ↳ *Telefon*
- ↳ *Mik Pegel* (Mikrofon Pegel)
- ↳ *Line Pegel*

Einstellungen

- ↳ *PIN Code*
- ↳ *Laden*
- ↳ *Sprache*
- ↳ *Name*
- ↳ *Funktionsanzeige (LED)*
- ↳ *Werkseinstell.*

Tastenschloss

À propos

Zurück (gilt sowohl für Haupt- als auch Untermenüs)

Hier kommen Sie zurück zum Menü und zum Hauptdisplay.

Kommunikation

Kanal

Um den Empfänger und Sender miteinander benutzen zu können, muss der gleiche Kanal eingestellt sein. Ab Werk wird bei Empfänger und Sender der gleiche Standardkanal eingestellt.

(Dies gilt nicht für Geräte, die Empfänger und Sender in einem beinhalten. Hier werden Sender/Empfänger eingestellt wie später beschrieben)

Kanal ändern:

1. Wählen Sie **Kanal** im Menü.
2. (Wählen Sie **Sender** oder **Empfänger** – bei Geräten die beides enthalten)
3. Wählen Sie einen neuen Kanal mit Hilfe der Menüsteuerung.

Beim Verbinden der Einheiten senden Sie automatisch auch die Kanalinformation, d.h. die Geräte senden dann über einen gemeinsamen Kanal.

Die Kanäle 1, 2 und 3 sind in den meisten europäischen Ländern frei und benötigen keine Genehmigung. Unter **Erweitert** können mehr Kanäle ausgewählt werden, die jedoch meist genehmigungsbedürftig sind – siehe Kapitel *Reichweite und Kanäle*.

FFC (Free Frequency Check): zeigt in grün, welche Frequenzen in der jeweiligen Umgebung geeignet sind. **Achtung:** Für ein korrektes Resultat müssen Sie weitere Digisystem-Sender abschalten.

Verbindung einrichten

Um einen Empfänger und Sender miteinander benutzen zu können, müssen sie miteinander „verbunden“ sein. Alle Sender und Empfänger werden im Werk verbunden und funktionieren miteinander.

Abhörsicherheit: Für Abhörsicherheit muss ein neuer sogenannter „Schlüsselcode“ generiert werden und beim Verbinden zwischen den Einheiten versendet werden.

Das Senden/Empfangen von Verbindungsinformation inkl. Schlüsselcode ist von jedem Digisystemprodukt mit Display möglich.

Verbindungsinformation oder ein neuer Schlüsselcode kann von mehreren aktivierten Geräten gleichzeitig empfangen werden.

Geräte, die Sender und Empfänger enthalten:

Diese Geräte sollten separat verbunden werden. Wenn Sie das *Verb. einrichten*-Menü öffnen, wählen Sie *Sender* oder *Empfänger*. Der Verbindungsknopf kontrolliert immer den Sender. Der Schlüsselcode ist für Sender und Empfänger in diesen Kombigeräten gleich.

Am besten sendet man einen neuen Schlüsselcode vom Kombigerät aus, so stellt man sicher, dass auch der eingebaute Empfänger denselben Code wie das restliche System erhält.

Verbinden (via Menü) und neuen Schlüsselcode generieren:

1. Gehen Sie in das Menü eines Digisystem-Gerätes (z.B. Empfänger DH10)
2. Wählen Sie **Kommunikation - Verb. einrichten**
3. Wählen Sie **Info empfangen**
4. Gehen Sie in das Menü des anderen Digisystem-Gerätes (z.B. Sender Microphone DM80)
5. Wählen Sie **Kommunikation - Verb. einrichten**
6. Wählen Sie **Neuer Schlüsselcode - Neuen Schlüssel-code generieren und Info senden?**
- **Ja (Info gesendet** erscheint im Display)
7. Ist die Verbindung geglückt, erscheint im Display der empfangsbereiten Einheit(en) unter **Verbindungsbereit - OK**
8. Kanal- und Schlüsselcodeinformationen wurden nun gesendet, die Signalübertragung zwischen den Einheiten ist nun abhörsicher.

Weiteres Gerät in das verbundene System hinzufügen:

1. Gehen Sie in das Menü des noch nicht verbundenen Digisystem-Gerätes
2. Wählen Sie **Kommunikation - Verb. einrichten**
3. Wählen Sie **Info empfangen**
4. Gehen Sie in das Menü eines bereits verbundenen Digisystem-Gerätes
5. Wählen Sie **Kommunikation - Verb. einrichten**
6. Wählen Sie **Info senden (Info gesendet!** erscheint im Display)
7. Ist die Verbindung geglückt, erscheint im Display der empfangsbereiten Einheit(en) unter **Verbindungsbereit - OK**

Verbinden (via Verbindungsknopf)

(die einzige Möglichkeit Einheiten ohne Display zu verbinden)

1. Drücken Sie 1x kurz den Verbindungsknopf - Verbindungsfunktion wird aktiviert (bei Geräten mit Display öffnet sich das Verbindungsmenü - Möglichkeit, schneller zu verbinden)
2. 2x kurz drücken: **Info senden** – Funktion wird aktiviert
3. 1x lang drücken: **Info empfangen** – Funktion wird aktiviert

Verbindungsfunktion abbrechen

Aktiviert man die Verbindungsfunktion des DM80, kann diese durch Drücken des Antwortknopfes abgebrochen werden. Wählt man die BT-Verbindungsfunktion und fährt nicht weiter fort, wird die Verbindungsfunktion nach 5 Minuten automatisch abgebrochen.

Bluetooth™

Kommunikation - Bluetooth: Hier kann man Bluetooth aktivieren, um das Conference Microphone DM80 mit einem Telefon oder Handy zu verbinden. Für die detaillierte Anwendung, lesen Sie bitte Kapitel **Mehr Funktionen - Bluetooth**

Telefon

Hier können Sie das DM80 so einstellen, dass es wie ein Telefon-Headset funktioniert:

1. Verbinden Sie das DM80 am Multifunktionsanschluss über das mitgelieferte Headset-Kabel mit dem Multi-funktionsanschluss Ihres Telefons.
2. Um die Telefonfunktion zu aktivieren, gehen Sie ins Menü unter **Kommunikation - Telefon - Aktivieren**. (Drücken Sie kurz die Menükontrolle; ein grünes Häkchen zeigt an, dass die Telefonfunktion aktiviert wurde)
3. Ein kleines Telefon erscheint links unten im Hauptdisplay.
4. Telefonieren Sie wie gewöhnlich mit Ihrem Telefon; die Stimme Ihres Gesprächspartners wird über das Kabel an das DM80 und von dort drahtlos an Ihren Digisystem-Empfänger übertragen.

Achtung: Sobald das Headset-Kabel an das DM80 angeschlossen wurde, schaltet sich das eingebaute Mikrofon automatisch ab und funktioniert nur während Telefongesprächen.

In-Pegel: Hier können Sie die Lautstärke für eingehende Telefongespräche einstellen (nicht BT).

Aus-Pegel: Hier können Sie die Lautstärke für ausgehende Telefongespräche einstellen (nicht BT).

Mikro-Modus: Hier können Sie den Mikrofon-Modus für Telefongespräche vorab einstellen (nicht BT).

(Standardmodus ist Zoom)

Anschlüsse

Hier können Sie auswählen, wozu der Multifunktionsanschluss genutzt werden soll.

- Ext. Mikro (Externes Mikrofon) (z.B. Ansteckmikrofon, Kopfmikrofon)
- Line in (z.B. TV, Radio, PC etc.)
- Telefon: hier können Sie ebenfalls die Telefonfunktion (über Kabel) des DM80 aktivieren (= selbe Funktion wie **Kommunikation - Telefon - Aktivieren**)
- Mik Pegel (Mikrofon Pegel): hier können Sie die Lautstärke des externen Mikrofons regulieren
- Line Pegel: hier können Sie die Lautstärke des Line-in einstellen.

Einstellungen

PIN Code

Hier kann man die PIN Code Funktion ein- und ausstellen.

Unter **PIN ändern** kann man seinen eigenen PIN Code erstellen.

Unter **Wahl sperren** kann man bestimmte Teile des Menüs sperren:

- *Funktion*: sperrt den Funktionsknopf (kann kombiniert werden mit allen *Verbinden*-Funktionen)
- *Verbinden*: sperrt alle *Verbinden*-Funktionen
- *Alle Menüs*: sperrt alle Menüs

Um gesperrte Funktionen zu öffnen, wird der PIN Code benötigt. Sollten Sie Ihren PIN Code vergessen haben, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

Laden

Hier können Sie Funktion **Auto Abschalt.** (Automatisch Abschalten) aktivieren; beim Laden schaltet sich das DM30 dann automatisch ab. Wenn **Autostart** aktiviert ist, startet die Einheit automatisch, wenn sie vom Ladegerät getrennt ist, oder das Ladegerät von der Stromversorgung getrennt wird.

Sprache

Hier können Sie die Menüsprache auswählen.

Name

Hier kann ein Displaytext ausgewählt werden (z.B. der Name des Anwenders). Buchstaben/Zahlen werden mit der Menükontrolle ausgewählt. Mit \checkmark speichern, mit x schließen Sie die Funktion ohne zu speichern. Den Cursor bewegen Sie mit den Symbolen > und < .

Funktionsanzeige

Hier können Sie die Funktionsanzeige ein- und ausschalten. Laden und Verbinden wird nicht beeinträchtigt.

Werkseinstell.

Setzt das Gerät zurück auf die werkseitigen Einstellungen und löscht alle Verbindungsinformationen.

Um Abhörsicherheit zu gewährleisten muss ein neuer Schlüsselcode generiert oder von einem anderen Gerät empfangen werden, welches sich bereits in dem codierten System befindet.

Tastenschloss

Mit dieser Funktion kann man alle Tasten sperren. Wurde das Tastenschloss aktiviert, erscheint **Tasten entsperren?** im Display, sobald man die Menükontrolle bewegt. Wählen Sie **Ja** um die Tasten zu entsperren.

À propos

Hier finden Sie Software Informationen.

Mehr Funktionen

Funktionsanzeige (LED)

Die Funktionsanzeige zeigt an, in welchem Status sich das Gerät befindet:

Ist das DM80 Mikrofon im **omni-direktionalen Modus**, blinkt die Anzeige 1x alle 3 Sekunden grün.

Ist das DM80 Mikrofon im **Zoom-Modus**, blinkt die Anzeige 2x alle 3 Sekunden grün.

Wenn die **Batterie** schwach wird, blinkt die Anzeige rot (je nach eingestelltem Mikrofon-Modus). Prüfen Sie den Batteriestatus im Display.

Während des **Ladevorgangs** leuchtet die Anzeige rot. Wenn das DM80 vollständig geladen ist, leuchtet die Anzeige grün.

Sollte das Gerät während des Ladevorgangs eingeschaltet sein, so bleibt die Leuchtdiode auch dann rot, wenn die Batterie bereits voll aufgeladen ist.

Wenn das DM80 **verbindungsbereit** ist, blinkt die Anzeige schnell grün.

Wenn das DM80 **Verbindungsinformation empfängt**, leuchtet die Anzeige für 3 Sekunden grün.

Wenn das DM80 **Verbindungsinformation sendet**, blinkt die Anzeige 5x rot.

Wenn **Bluetooth aktiviert** wurde, leuchtet die Anzeige blau.

Wenn ein **Bluetooth-Telefon verbunden** wurde, blinkt die Anzeige 5x blau.

Während eines **Telefongesprächs** blinkt die Anzeige alle 2 Sekunden blau.

Wenn **BT zurück** ausgewählt wird, blinkt die Anzeige 10x blau.

Bluetooth™

Das Microphone DM80 kann mit 2 Bluetooth-Telefonen gleichzeitig verbunden werden. Die Person, mit der Sie sprechen, hört Sie durch die Mikrofone des DM80.

Die Stimme Ihres Gesprächspartners wird über das DM80 zu Ihrem Digisystem-Empfänger gesendet.

Anwendung

Bevor Sie mit Ihrem Handy oder schnurlosen Telefon über das DM80 telefonieren können, müssen Sie eine Bluetooth-Verbindung herstellen. Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem Handy oder Telefon.

- Wählen Sie im Menü **Kommunikation - Bluetooth - Aktivieren**
- Wollen Sie das DM80 nur zum Telefonieren verwenden, dann wählen Sie **Nur BT**: das Gerät sendet nur während Sie telefonieren.


Unter **BT verbinden** finden Sie:

- **Handy verbinden** (Code 1234) wählt man, um ein Handy mit dem DM80 zu verbinden.
- **Telefon verbinden** (Code 0000) wählt man, um ein schnurloses Telefon (DECT) oder ein Handy mit dem DM80 zu verbinden.
- **BT zurück** wählt man, um alle bestehenden Bluetooth-Verbindungen zu löschen. **Achtung**: Damit Bluetooth funktionieren kann, müssen Bluetooth-Verbindungen dann erst wieder hergestellt werden.
- Mit **Mix Level** können Sie die Lautstärke Ihrer eigenen Stimme einstellen; dies geht nur während eines Telefongesprächs.
- Unter **Mikro Modus** kann man den Mikrofon-Modus für Telefongespräche vorab einstellen.

Wenn Sie sowohl ein schnurloses als auch ein Handy anschließen wollen:

Bei manchen schnurlosen Telefonen ist die Bluetooth-Verbindung nicht aktiv, so lange nicht gesprochen wird. Dies kann eine Zeitverzögerung beim Bluetooth-Anschluss bewirken, sobald ein Anruf ankommt.

Manchmal kann die Zeitverzögerung vermieden werden, indem man stattdessen **Handy verbinden** verwendet; dies kann jedoch zu Problemen beim Anrufen mit dem drahtlosen Telefon führen.

Wenn Bluetooth aktiviert wurde, erscheint das Bluetooth-Symbol  im Display.

Wenn ein Telefon verbunden wurde, erscheint die Ziffer 1 neben dem Bluetooth-Symbol; wurden 2 Telefone verbunden, erscheint die Ziffer 2.

Einige schnurlose Telefone sind nur während des Telefonats verbunden. In diesem Fall steht eine 1 im Display, auch wenn ein Handy und ein schnurloses Telefon mit dem DM80 verbunden wurden.

Das DM80 unterstützt Handsfree Bluetooth-Profile.

Anruf beantworten

Drücken Sie kurz den Antwortknopf (ca. ½ Sekunde) oder antworten Sie wie gewöhnlich mit dem Telefon.

Anruf beenden

Drücken Sie kurz den Antwortknopf (ca. ½ Sekunde) oder beenden Sie das Gespräch wie gewöhnlich mit dem Telefon.

Anrufen

Verwenden Sie Ihr Telefon wie üblich. Via Bluetooth ist es mit dem DM80 verbunden; d.h. Sie sprechen und hören Ihren Gesprächspartner über das DM80; die Stimme Ihres Gesprächspartners wird vom DM80 an Ihren digitalen Empfänger weitergeleitet.

Mikrofon Modus

Während des Telefongesprächs können Sie unter **Kommunikation - Bluetooth - Mikro Modus** zwischen den Modi Zoom und Omni wechseln.

Lautstärke

Während eines Telefongesprächs können Sie mit Hilfe der Menükontrolle an der Seite des DM80 die Telefonlautstärke regulieren. Im Display sehen Sie die aktuelle Lautstärke.

Manche Handys benötigen eine weitergehende Anpassung der Lautstärke; dies können Sie z.B. bei SonyEricsson im Equalizer des Media Players.

Achtung: Es ist nicht möglich, einen Bluetooth-Anruf zu tätigen, wenn gleichzeitig die Telefonfunktion aktiviert ist, d.h. ein Festtelefon über das Headset-Kabel verbunden ist. Es ist jedoch möglich, einen ankommenden Bluetooth-Anruf zu beantworten.

Nummernpräsentation

Bei ankommenden Anrufen wird im Display Name und Nummer des Anrufers angezeigt, wenn diese im Telefonbuch hinterlegt sind und das Telefon über die entsprechende Funktion verfügt.

Reichweite und Kanäle

Der Sender und Empfänger Ihres Digisystems haben eingebaute Antennen. Die Reichweite zwischen den beiden Geräten beträgt – je nach Umgebung – ca. 30 Meter.

Wie alle Funksysteme sendet das Digisystem auf spezifischen Kanälen. Verwenden Sie 2 Sender auf dem gleichen Kanal oder benachbarten Kanälen, kann es zu Störungen kommen. Andere elektronische Geräte können ebenfalls zu Störungen führen.

In den meisten europäischen Ländern dürfen die Kanäle 1-3 (863.250 – 864.750 MHz) für Hörprodukte verwendet werden. Trotzdem sollten Sie mit Ihrer Frequenzuteilungsbehörde prüfen, welche Kanäle Sie anwenden dürfen und für welche Sie eine Genehmigung benötigen.

Unter **Erweiterte** finden in den Bändern A-F weitere Kanäle, die in den meisten europäischen Ländern eine Genehmigung benötigen:

- B 854 - 863 MHz
- E 833 - 854 MHz
- F 865 - 872 MHz

Mitgeliefertes Zubehör

Halsband (2 versch. Längen)

Headset-Kabel

Ansteckmikrofon

Ladegerät

Splitkabel zum Laden

Audiokabel

Ladekabel (Auto)

Geeignet für Fahrzeuge mit einem 12 Volt geerdeten elektrischem System. Das Kabel verfügt über Kurzschluss- und automatischen Überladeschutz. Lösen Sie das Kabel aus dem Anschluss nach Gebrauch.

Weiteres Originalzubehör

Kopfmikrofone

- Headset-Mikrofon (an 2 Ohren befestigt)
- Ohr-Mikrofon (an einem Ohr befestigt)

Ladestation

Die Ladestation wird mit dem mitgelieferten Ladegerät verbunden. Mehrere Ladestationen können miteinander gekoppelt werden und mit einem Ladegerät verwendet werden. Werden mehr als 2 Ladestationen verbunden, wird ein stärkeres Ladegerät benötigt.

Mehr Zubehör finden Sie auf unserer Homepage unter
www.comfortaudio.com

Fehlersuche

Sender und Empfänger starten nicht

- Laden Sie Sender und Empfänger.
- Drücken Sie den Ein/Aus-Knopf für ca. 2 Sekunden, um das Gerät zu starten.
- Prüfen Sie, ob das Ladegerät korrekt eingesteckt wurde.

Schlechte Sprachverständlichkeit

- Möglicherweise ist die Entfernung zwischen Sender und Empfänger zu lang die Reichweite beträgt ca. 30m.
- Die Entfernung zwischen Mikrofon und dem Sprecher könnte zu lang sein; bringen Sie das Mikrofon näher an den Sprecher.
- Wechseln Sie den Kanal und/oder die Umgebung.

Schlechte Reichweite und Störungen

In manchen Umgebungen, z.B. in Gebäuden, die viel Beton, Stahl oder Blech enthalten, kann die Reichweite reduziert sein. Außerdem kann weitere elektronische Ausrüstung zu Störungen führen. Ändern Sie den Kanal.

Kein Ton

Prüfen Sie, dass Sender und Empfänger auf dem gleichen Kanal senden.

Lautes Rauschen (keine Klangübertragung)

Prüfen Sie, dass die beiden Einheiten miteinander verbunden sind.

Gerät startet nicht beim Laden

Lösen Sie das Ladegerät; prüfen Sie unter *Einstellungen - Laden - Autom. Abschalten*

Service und Garantie

Comfort Audio AB gewährt eine begrenzte Garantie von 2 Jahren ab Lieferdatum. Sie deckt alle Fabrikations- und Materialfehler. Für Zubehör gilt eine Garantie von 90 Tagen ab Lieferdatum. Lokale Vereinbarungen oder Bestimmungen können vorkommen. Sie deckt keine durch mutwillige Beschädigung, falsche oder unsachgemäße Handhabung des Gerätes oder dessen Zubehörs entstandene Schäden.

Die für das Comfort Digisystem verwendeten Batterien sind am besten oft und kurzzeitig zu laden. Sie sind nämlich so konstruiert, dass sie bereits nach der halben Ladedauer 90 % ihrer Leistung erreichen. Die Batterieleistung lässt sich optimieren, wenn sich die Batterie während der Aufbewahrung nicht ganz entlädt. Es ist völlig normal, dass die Batteriekapazität mit der Zeit nachlässt. Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Art und Weise der Benutzung ab. Kontaktieren Sie Ihren Händler zum Batteriewechsel.

Selbstverständlich können Sie sich für Fragen jederzeit gerne an Comfort Audio wenden.

Technische Merkmale

Sendetyp:	SST – SecureStream Technology
Reichweite:	ca. 30 m
Größe:	84 x 39 x 14 mm
Gewicht:	45 g
Frequenzen:	832 – 872 MHz
Antenne:	eingebaut
Betriebszeit:	Die Betriebsdauer variiert, je nachdem welche Funktionen aktiviert sind bzw. angewendet werden. Eine solche Funktion ist das Telefonieren per Bluetooth. Hier wird empfohlen, die Einheit während der Mittags- oder einer anderen Pause zu laden. Ist Bluetooth deaktiviert, so beträgt die Betriebszeit bis zu 7 Stunden. Die Betriebsdauer wurde mit Werkseinstellungen gemessen.
Batterie:	aufladbar, Li-Polymer
Ladedauer:	ca. 2 Stunden
Mikrofon:	eingebaut, Zoom und omni-direktional
Anschlüsse:	Line in / TV / Headset Kabel (Telefon)



Wichtige Sicherheitshinweise – Bitte vor Gebrauch des Gerätes lesen

- 1) Lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung.
- 2) Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf.
- 3) Beachten Sie die Warnhinweise.
- 4) Folgen Sie allen Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie Geräte nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Säubern Sie die Geräte nur mit einem trockenen Tuch.
- 7) Verwenden Sie die Geräte nicht in der Nähe von Heizquellen.
- 8) Nicht auf das Ladekabel treten oder dieses knicken.
- 9) Verwenden Sie nur Comfort Audio Original Zubehör oder Ersatzteile.
- 10) Während Gewittern nicht an Stromquelle anschließen.
- 11) Lassen Sie Service nur von qualifiziertem Service-personal durchführen. Service ist notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde: z.B. das Ladekabel oder der Anschluss wurden beschädigt; Flüssigkeit wurde auf das Gerät geschüttet oder ein schwerer Gegenstand ist auf das Gerät gefallen; das Gerät war Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt; das Gerät funktioniert nicht normal oder wurde fallen gelassen.
- 12) Stellen Sie zu Beginn immer eine niedrige Lautstärke ein und erhöhen Sie diese bei Bedarf.
- 13) Zu hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen.
- 14) Demontieren Sie nicht das Gerät.
- 15) Sollte das Gerät auf Grund einer Beschädigung aufbrechen, sollte nur qualifiziertes Servicepersonal die Reparatur durchführen.

- 16) Senden Sie nur auf genehmigten Frequenzen. Prüfen Sie bei Ihrer Frequenzzuteilungsbehörde, welche Frequenzen in Ihrer Umgebung frei sind.
- 17) Das Gerät enthält empfindliche Elektronik und sollte entsprechend sorgsam behandelt werden.
- 18) Laden Sie das Gerät niemals in geschlossenen, ungelüfteten Behältern oder Taschen.
- 19) Verwenden Sie nur original Comfort Audio Batterien und Ladegeräte.
- 20) Wechseln Sie die Batterie nicht selbst sondern kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.
- 21) **Achtung!** Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht korrekt ausgetauscht wird.
- 22) Gerät nicht zu großer Hitze (Sonne, Feuer etc.) aussetzen.
- 23) Produkte enthalten Radiosender. Verwenden Sie Produkte nicht in Umgebungen, in denen die Benutzung elektronischer Ausrüstung verboten ist, z.B. in Flugzeugen.
- 24) Das Produkt oder die Batterien dürfen keinen hohen Temperaturen wie z. B. Sonneneinstrahlung oder Feuer ausgesetzt werden.
- 25) **Achtung!** Verwenden Sie niemals die Halsschlinge, wenn die Gefahr besteht, dass sie an einem Gegenstand oder einer Maschine hängen bleibt.
- 26) Um zu verhindern, dass die Batterie beschädigt wird, lassen Sie das Gerät nicht zu lange ungeladen liegen.
- 27) Lassen Sie das Gerät nicht am Ladekabel, wenn es längere Zeit nicht angewendet wird.

Änderungen vorbehalten



Hersteller:

Comfort Audio AB

Box154, SE-301 05 Halmstad, Sweden
Tfn +46 35 260 16 00 Fax +46 35 260 16 50
info@comfortaudio.com www.comfortaudio.com